

Producto **MICRO-DAP DIPHOTERINE SPRAY 100 ML LAVADO PIEL**

Código **600106**



1. Descripción	MICRO-DAP DIPHOTERINE SPRAY 100 ML LAVADO PIEL
2. Marca	Diphoterine® Prevor
3. Procedencia	Francia

Características técnicas del producto

Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine® Para pequeñas zonas del cuerpo como: manos, rostro, cuello.

4. Imagen referencial



The image shows two 100 ml spray bottles of Diphoterine Micro Dap. To the right is a diagram illustrating the application process: 1. Spray the solution onto the hand. 2. Rub the solution into the skin. A 60-second timer icon is shown, indicating the required contact time. Safety icons include a warning symbol, a hand being washed, and a first aid symbol.

5. Características específicas Micro Dap Diphoterine®	Dimensiones	178 mm de altura 40 mm de diámetro
	Cantidad	100 ml
	Peso	200 g
	Contenido	Solución Diphoterine®
	Utilización	Una mano o un pie
	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	Accesorio disponible	Funda: estuche por el cinturón
	Es Estéril	El contenido es liquido esterilizado
	Uso	Después de su uso debe desecharse.
	Clasificación según MINSAL	Dispositivo medico clase II <i>Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.</i>
	Gas propulsor	Nitrógeno comprimido Clase 2 NCh 2190-19 Gas no inflamable.
Almacenamiento	Proteger de la intemperie y de golpes	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

6. Cobertura sobre grupos de químicos	Cobertura	Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores. <i>*En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)</i>
7. Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Spray portátil, ligero y compacto. • Fácilmente identificable y manejable. • Utilización simple y lista para el uso. • Permite una acción rápida. • Para el lavado de salpicadura química. • Solución estéril. • Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo. • Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. • Impermeable y compacto. • Sin mantenimiento ni instalación particulares. • Conforme a la norma EN 15154-3 • Certificación CE. 	
8. Protocolo de uso	<p>Formato indicado para proyecciones en la piel, una salpicadura, de sustancia química en la piel.</p> <p>Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.</p> <p>En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación</p> 	
9. Características Diphoterine®	<ul style="list-style-type: none"> • Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores, oxidantes. • Máximo efecto: Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos. • Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. • Diphoterine® está clasificado como “Dispositivo medico clase 2 uso externo.” No sujeto a control de medicamentos. • No es toxico. • Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios. • Libre de fosfatos. 	

DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl
hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587