

Producto MINI-DAP DIPHOTERINE SPRAY 200 ML LAVADO DE PIEL

Código 600107



1. Descripción	MINI-DAP DIPHOTERINE SPRAY 200 ML LAVADO DE PIEL
2. Marca	Diphoterine® Prevor
3. Procedencia	Francia

Características técnicas del producto

Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine® Para pequeñas zonas del cuerpo como: manos, rostro, cuello.



5. Características específicas Mini Dap Diphoterine®	Dimensiones	235 mm de altura 40 mm de diámetro
	Cantidad	200 ml
	Peso	290 g
	Contenido	Solución Diphoterine®
	Utilización	Una mano o un pie
	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	Accesorio disponible	Funda: estuche por el cinturón
	Es Estéril	El contenido líquido esterilizado
	Uso	Después de su uso debe desecharse.
	Clasificación según MINSAL	Dispositivo médico clase II <i>Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.</i>
Gas propulsor	Nitrógeno comprimido Clase 2 NCh 2190-19 gas no inflamable.	
Almacenamiento	Proteger de la intemperie y evitar golpes	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

6. Cobertura sobre grupos de químicos	Cobertura	Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores. <i>*En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)</i>
7. Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Portátil, Ligero y compacto. • Fácilmente identificable y manejable. • Utilización simple y lista para el uso. • Permite una acción rápida. • Solución estéril. • Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo. • Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. • Impermeable y compacto. • Sin mantenimiento ni instalación particulares. • Conforme a la norma EN 15154-3 • Certificación CE. 	
8. Protocolo de uso	<p>Formato indicado para proyecciones en la piel, una salpicadura, de sustancia química en la piel.</p> <p>Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.</p> <p>Superficie de intervención: Rostro, brazo o superficie corporal equivalente.</p> <p>En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación.</p> <div data-bbox="649 1113 1234 1260" style="text-align: center;">  <p>Rostro o brazo</p> <p>Usar 1 MINI DAP 200 ml</p> </div>	
9. Características Diphoterine®	<ul style="list-style-type: none"> • Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores, oxidantes. • Máximo efecto: Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos. • Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. • Diphoterine® está clasificado como “Dispositivo medico clase II uso externo.” No sujeto a control de medicamentos. • No es toxico. • Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios. • Libre de fosfatos. 	
DATOS DE CONTACTO		
Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587		