



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.1 - 2025

Producto Botiquín mural acrílico



Código 700001

1. Descripción	Botiquín mural acrílico	
2. Marca	Prevor	
3. Procedencia	Francia	
Características técnicas del producto		
Botiquín acrílico mural Diphoterine®, Ducha de emergencia química para descontaminación ocular y cutánea. Permite el lavado ocular dentro del primer minuto ocurrida la salpicadura y zonas del cuerpo como rostro y cuello, brazo completo y superficies corporales similares.		
4. Imagen referencial		
5. Contenido	Descripción	
	Cantidad	
	LMPD Diphoterine® Botella 500 mL lavado ojos	1 UN
	MINI Diphoterine® 200 mL lavado para piel	1 UN
6. Características específicas del botiquín	Material	Acrílico
	Dimensiones	27 x 14 x 6 cm
	Otros	Señalética lavado ocular y cutáneo Orificios para fijación a muro
7. Aplicaciones	• Pequeñas áreas de atención: • Policlínicos • Ambulancias	

	• Unidades de rescate • Sala de primeros auxilios • Laboratorios	
	Características Técnicas Diphoterine® MINI DAP	
8. Imagen referencial		
9. Características Diphoterine®	Diphoterine® es una ducha de emergencia química polivalente, capaz de evitar la quemadura química. • Máximo efecto: Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos. • Solución Hipertónica, Anfótera, Multiagente. • Sin reacciones químicas ni efectos secundarios. • Libre de fosfatos. • No es Tóxica • Solución de lavado estéril. • Conforme a la norma EN 15154-3	
	Cobertura	Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores. <i>*En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)</i>
	Mecanismo de acción	Acción física sobre el producto químico. Encapsula, inactiva y extrae el químico sin efectos secundarios.
	Superficie de intervención	Rostro, brazo o superficie corporal equivalente. En caso de usar sobre rostro, cierre los ojos durante su aplicación.

- Solución de un solo uso. Desechar luego de vaciar el contenido.
- Almacenar entre 2° y 50° C.
- Temperatura optima de uso entre 15° y 35°.

En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación.

The infographic illustrates the correct use of the DAP Mini spray. It features a large orange arrow pointing from left to right, indicating the direction of use. On the left, a person is shown standing. In the center, a large orange arrow points to the right, with the text "Rostro o brazo" (Face or arm) written on it. On the right, a person is shown using the spray. A large red "60" with a dollar sign indicates a 60-second timer. A circular inset shows a hand being sprayed, labeled "100 ml". Another circular inset shows a person's face being sprayed, labeled "200 ml". A warning symbol (a hand with a lightning bolt) and a medical symbol (a cross) are also present.

Usar
1 MINI DAP
200 ml

Características Técnicas Diphoterine® LPMD

11. Imagen referencial



12. Características Diphoterine®

Diphoterine® es una ducha de emergencia química polivalente, capaz de evitar la quemadura química.

- **Máximo efecto:** Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.
- Solución Hipertónica, Anfótera, Multiagente.
- Sin reacciones químicas ni efectos secundarios.
- Libre de fosfatos.
- No es Tóxica
- Solución de lavado estéril.
- Conforme a la norma EN 15154-4

Cobertura

Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores.

**En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)*

Mecanismo de acción

Acción física sobre el producto químico. Encapsula, inactiva y extrae el químico sin efectos secundarios.

Superficie de intervención

Indicado para salpicaduras oculares. Una botella de 500 ml permite la descontaminación de un ojo

	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos, idealmente inmediatamente después del contacto con el producto químico.
	Clasificación MINSAL	Dispositivo medico clase II. <i>Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.</i>
	Recomendaciones de uso	• Solución de un solo uso. Desechar luego de vaciar el contenido. • Almacenar entre 2° y 50° C. • Temperatura optima de uso entre 15° y 35°.
13. Protocolo de uso	Formato indicado para proyecciones sobre ojo después de una salpicadura química. Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor. Superficie de intervención: Un ojo. <i>*Para perfeccionar su aplicación, se recomienda utilizar una solución post-lavado o Afterwash para permitir que el ojo recupere un estado de confort.</i>	
		
	DATOS DE CONTACTO Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tienda.sagita.cl	



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.1 - 2025

scliente@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587