



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.2 2024



Producto **Kit de emergencia derrame citostáticos**

Código **700300**

1. Descripción	Kit de emergencia citostáticos		
2. Marca	Sagita		
Características técnicas del producto			
Kit de emergencia para contención de derrames de fármacos citostáticos (medicamentos que pueden interrumpir el ciclo celular en alguna de sus fases, deteniendo o impidiendo el crecimiento de células capaces de producir cáncer). Cuenta con elementos de protección específicos para recogida de estos fármacos y equipamiento específico para la absorción (Polycaptor®)			
3. Imagen referencial	Imagen referencial 		
4. Contenido del kit	Descripción	Cantidad	
		Cant. (UN)	Abs x Total (L)
	Paño absorbente polipropileno químicos 4 mm - 40 x 50 cm – Cap. Abs. 0,6 L	12	7,2
	Polycaptor® polvo absorbente 250 gramos	1	1
	Guantes s/polvo Neopreno Nitrilo MICROFLEX 93-260 (par)	2	NA
	Pechera delantal plástico desechable	1	NA
	Guantes de látex multiuso (Par)	1	NA
	Lentes de seguridad	1	NA

	Gorro clip desechable	1	NA
	Cubre calzado desechable (Par)	1	NA
	Manguilla plástica desechable (Par)	1	NA
	Mascarilla respirador FFP3 con válvula	1	NA
	Calza cubre botas (par)	1	NA
	Pinza plástica	1	NA
	Toalla jabonosa	5	NA
	Alcohol desnaturalizado 70° - 250 ml	1	NA
	Agua mineral 500 ml	2	NA
	Escobilla + pala plástica simple	1	NA
	Bolsa de desechos químicos bio-hazard roja	2	NA
	Caja transparente	1	NA
	Total	8,2	

Características técnicas Guante de protección química MICROFLEX® 93-260

5. Características y ventajas	- Diseño de 3 capas: interior: suave y de fácil colocación. Media: Resistente a ácidos y bases. Externa: Resistente a solventes. - Grosor de 0.198 mm, lo cual ofrece mejor sensibilidad táctil y destreza. - Material extra suave y diseño ergonómico para un mayor ajuste, sensación y flexibilidad. - Puño con reborde.
6. Imagen referencial	
6. Material	Nitrilo + neopreno
7. Color	Exterior verde, interior azul
8. Aplicaciones	▪ Mezcla, materiales compuestos ▪ Manejo de equipo aeroespacial & piezas

	- Manejo de herramientas de pintura incluyendo pistolas rociadoras y robots - Manejo de fugas imprevistas, derrames u otras emisiones - Mantenimiento y limpieza de equipos - Montaje y desmontaje, ensamble - Procesamiento de productos petroquímicos - Pruebas de rutinas y experimentales - Toma de muestras y procesamiento en laboratorio - Transferencia de líquidos y sólidos
9. Almacenamiento	Mantener fuera de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco. Mantenga alejado de fuentes de ozono e ignición.
10. ISP	0680-2020 
11. Segmento de necesidades	Guante de alto riesgo. Guantes con el puño extendido para ofrecer protección adicional a la muñeca y antebrazo.
Características técnicas Polvo Absorbente Polycaptor®	
12. Características y ventajas	Polycaptor® es un producto en polvo fabricado por el laboratorio PREVOR, que se utiliza como absorbente en caso de derrames líquidos. Se destina a contrarrestar cualquier tipo de derrame accidental de producto líquido: acuoso, aceites e hidrocarburos. - Absorbe cualquier tipo de líquido industrial - No deja capa residual - Facilita la recogida del líquido una vez absorbido - No es peligroso para el hombre ni para el medio ambiente
13. Imagen referencial	 

14. Instrucciones de uso

1. Verter el absorbente alrededor de la sustancia derramada
2. Cubrir el líquido con el absorbente
3. Dejar actuar hasta que el contenido este solidificado
4. Recoger el residuo solidificado
5. Eliminar el residuo solidificado de acuerdo con la normativa vigente

Paso a paso para contener un derrame

1. Avise y limite el tránsito en la zona de derrame
2. Use EPP para la contención.
3. Rodear el derrame utilizando barrera o polvo absorbente
4. Cubrir el derrame con polvo absorbente o absorber con paños o cojines
5. Disponer de los residuos en bolsa de recogida junto con EPP utilizados, sellar y desechar según corresponda.



DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tienda.sagita.cl
hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587