


**Producto** LPMD Diphoterine ® 500 mL  
**Código** 600109

<b>Descripción</b>	LPMD Diphoterine ® 500 mL lavado de ojos
<b>Marca</b>	Diphoterine ® Prevor
<b>Procedencia</b>	Francia

**Características técnicas del producto**

Ducha de descontaminación química de emergencia para ojo, solución Diphoterine®  
 Formato Botella PVC para gabinete con tubo copa ocular ergonómica.

**Imagen referencial**

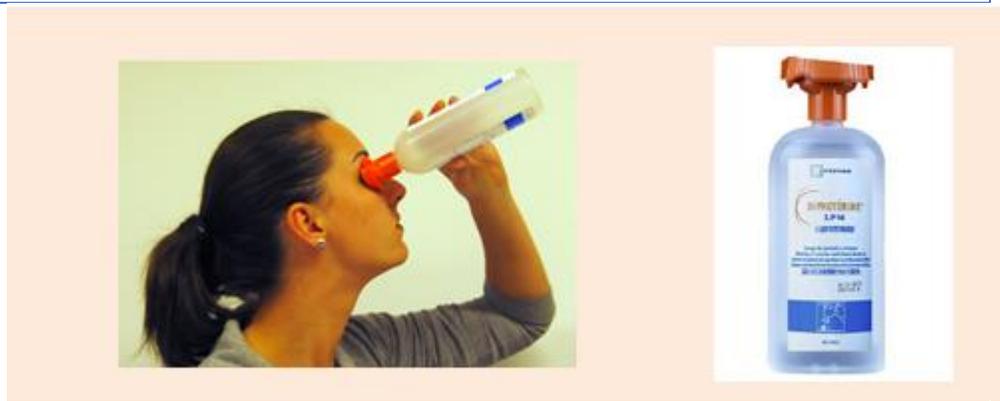

Cantidad	500 mL
Peso	595 g
Caducidad	2 años
Contenido	Solución Diphoterine®
Utilización	Un ojo
Plazo de intervención	Máximo 1 minuto
Es Estéril	El contenido liquido esterilizado
un solo Uso	Después de su uso debe desecharse.
Clasificación según Minsal	Dispositivo medico clase 2

**Cobertura sobre grupos de químicos**

Cobertura	Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes , oxidantes y reductores.
-----------	--

<p><b>Ventajas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fácilmente identificable y manejable.</li> <li>▪ Utilización simple y lista para el uso.</li> <li>▪ Permite una acción rápida.</li> <li>▪ El aplicador ocular ergonómico facilita la apertura del ojo.</li> <li>▪ Lavado suave sin presión y autónomo.</li> <li>▪ Solución estéril.</li> <li>▪ Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo.</li> <li>▪ Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único.</li> <li>▪ Impermeable y compacto.</li> <li>▪ Sin mantenimiento ni instalación particulares.</li> <li>▪ Conforme a la norma EN 15154-4.</li> <li>▪ Certificación CE.</li> </ul>
<p><b>Protocolo de uso industria</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formato indicado para proyecciones oculares, de sustancia química en el ojo.</li> <li>▪ Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>Intervención entre 10 y 60 segundos</p> </div>
<p><b>Características Diphoterine®</b></p>	<p>Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes</p> <p>Maximo efecto Extraer el quimico del ojo, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.</p> <p>Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como “Dispositivo medico clase 2 uso externo.” No sujeto a control de medicamentos.</p> <p>No es toxico Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.</p>