

**Producto** Mini Dap Diphoterine ® 200 mL espray.  
**Código** 600107

<b>Descripción</b>	Mini Dap Diphoterine ® 200 mL lavado de piel	
<b>Marca</b>	Diphoterine ® Prevor	
<b>Procedencia</b>	Francia	
<b>Características técnicas del producto</b>		
<p>Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine®          Para zonas de hasta el 9% de superficie del cuerpo como: rostro y cuello, brazo completo, torso, etc.</p>		
<b>Imagen referencial</b>		
<b>Características específicas Lis 50 mL Diphoterine®</b>	Dimensiones	235 mm de altura 40 mm de diámetro
	Cantidad	200 mL
	Peso	290 g
	Caducidad	2 años
	Contenido	Solución Diphoterine®
	Utilización	Una mano o un pie
	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	Accesorio disponible	Funda: estuche por el cinturón
	Es Estéril	El contenido liquido esterilizado
	un solo Uso	Después de su uso debe desecharse.
	Clasificación según Minsal	Dispositivo medico clase 2
Gas propulsor	Nitrógeno comprimido Clase 2- Nch2190-19 gas no inflamable.	
<b>Cobertura sobre grupos de químicos</b>	Cobertura	Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes , oxidantes y reductores.

<p><b>Ventajas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Portátil, Ligero y compacto.</li> <li>▪ Fácilmente identificable y manejable.</li> <li>▪ Utilización simple y lista para el uso.</li> <li>▪ Permite una acción rápida.</li> <li>▪ El aplicador ocular ergonómico facilita la apertura del ojo.</li> <li>▪ Lavado suave sin presión y autónomo.</li> <li>▪ Solución estéril.</li> <li>▪ Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo.</li> <li>▪ Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único.</li> <li>▪ Impermeable y compacto.</li> <li>▪ Sin mantenimiento ni instalación particulares.</li> <li>▪ Conforme a la norma EN 15154-4.</li> <li>▪ Certificación CE.</li> </ul>
<p><b>Protocolo de uso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Formato indicado para proyecciones en la piel, de sustancia química.</li> <li>▪ En superficies de hasta 9% de superficie.</li> <li>▪ Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.</li> <li>▪ En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación.</li> </ul>  <p>The diagram illustrates the application of Diphoterine. It shows two human figures. The first figure has a rectangular orange box around its head, representing facial application. The second figure has a larger orange box around its torso and arms, representing application to a larger body surface. An orange arrow points from the second figure to a bottle of Diphoterine spray, with the text '9% de la superficie del cuerpo' (9% of the body surface) written inside the arrow.</p>
<p><b>Características Diphoterine®</b></p>	<p>Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes</p> <p>Maximo efecto Extraer el químico de la piel, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.</p> <p>Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como “Dispositivo medico clase 2 uso externo.” No sujeto a control de medicamentos.</p> <p>No es toxico Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.</p>

