



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V. 5 - 2022

Producto MICRO-DAP DIPHOTERINE SPRAY 100 ML LAVADO PIEL

Código 600106



1. Descripción	MICRO-DAP DIPHOTERINE SPRAY 100 ML LAVADO PIEL
2. Marca	Diphoterine® Prevor
3. Procedencia	Francia

Características técnicas del producto

Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine® Para pequeñas zonas del cuerpo como: manos, rostro, cuello.



5. Características específicas Micro Dap Diphoterine®	Dimensiones	178 mm de altura 40 mm de diámetro
	Cantidad	100 ml
	Peso	200 g
	Contenido	Solución Diphoterine®
	Utilización	Una mano o un pie
	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	Accesorio disponible	Funda: estuche por el cinturón
	Es Estéril un solo Uso	El contenido liquido esterilizado Después de su uso debe desecharse.
	Clasificación según Minsal	Dispositivo medico clase 2
	Gas propulsor	Nitrógeno comprimido Clase 2- Nch2190-19 gas no inflamable.
	Almacenamiento	Proteger de la intemperie y de golpes

6. Cobertura sobre grupos de químicos	Cobertura	Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores.
6. Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Portátil, Ligero y compacto. • Fácilmente identificable y manejable. • Utilización simple y lista para el uso. • Permite una acción rápida. • El aplicador ocular ergonómico facilita la apertura del ojo. • Lavado suave sin presión y autónomo. • Solución estéril. • Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo. • Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. • Impermeable y compacto. • Sin mantenimiento ni instalación particulares. • Conforme a la norma EN 15154-4. • Certificación CE. 	
8. Protocolo de uso	<p>Formato indicado para proyecciones en la piel, una salpicadura, de sustancia química en la piel.</p> <p>Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.</p> <p>En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación</p> 	
9. Características Diphoterine®	<p>Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes</p> <p>Máximo efecto Extraer el químico del ojo, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.</p> <p>Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como “Dispositivo medico clase 2 uso externo.” No sujeto a control de medicamentos. No es toxico</p> <p>Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.</p>	
DATOS DE CONTACTO		
Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587		