

Producto ESTACION COMPLETA DIPHOTERINE-CAJA POLIURETANO C RUEDA

Código 600130



| | |
|----------------|--|
| 1. Descripción | ESTACION COMPLETA DIPHOTERINE-CAJA POLIURETANO C RUEDA |
| 2. Marca | Diphoterine® Prevor |
| 3. Procedencia | Francia |

Características técnicas del producto

Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine®
 Para zonas sobre el 9% y hasta el cuerpo completo de superficie del cuerpo como: torso y abdomen, pierna completa, cuerpo completo.






5. Contenido

- 1 Dap de 5 L
- 1 Mini Dap 200 ml
- 2 Lavajos 500 ml
- 1 After Wash
- 1 Señaléticas

| | | |
|--|----------------------|---|
| 6. Características específicas DAP 5L Diphoterine® | Utilización | Todo el cuerpo ojos y piel |
| | Accesorio disponible | Incluye estación plástica con ruedas, para protección y traslado de Diphoterine®. |
| | Peso | 15 kg |
| | Contenido | Solución Diphoterine® distintos formatos |
| | Es Estéril | El contenido liquido esterilizado |
| | Un solo Uso | Después de su uso debe desecharse. |
| | Recargable | Únicamente Dap 5 Litros es recargable |

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 7. Cobertura sobre grupos de químicos | Clasificación según Minsal | Dispositivo medico clase 2 |
| | Gas propulsor | Dióxido de carbono Clase 2- Nch2190-19 gas no inflamable. |
| | Cobertura | Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores. |
| 8. Ventajas | <ul style="list-style-type: none"> • Portátil, Ligero y compacto. • Fácilmente identificable y manejable. • Utilización simple y lista para el uso. • Permite una acción rápida. • El aplicador ocular ergonómico facilita la apertura del ojo. • Lavado suave sin presión y autónomo. • Solución estéril. • Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo. • Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. • Impermeable y compacto. • Sin mantenimiento ni instalación particulares. • Conforme a la norma EN 15154-4. • Certificación CE. | |
| 9. Protocolo de uso | <p>Formato indicado para proyecciones en la piel, de sustancia química. En superficies de sobre el 9% hasta todo el cuerpo. Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor. En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="477 1312 683 1570"> <p>1. Despejar y quitar la ropa</p>  <p>1</p> </div> <div data-bbox="725 1312 964 1570"> <p>2. Abrir y activar la ducha emergencia</p>  <p>2</p> </div> <div data-bbox="979 1312 1195 1570"> <p>3. Aplicar el formato completo sobre la zona</p>  <p>3</p> </div> <div data-bbox="1214 1312 1435 1570"> <p>4. Avisar y consultar medico</p>  <p>4</p> </div> </div> | |

Use cada formato de Diphoterine® para la zona del cuerpo según el protocolo Prevor

INTERVENCIÓN EN EL PRIMER MINUTO



Intervención en los
10 primeros segundos



Usar
1 LIS
50 ml

Intervención entre
10 y 60 segundos




Usar
1 LPM
500 ml



3% de la superficie
del cuerpo



Usar
1 MICRO DAP
100 ml

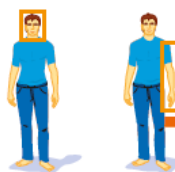

9% de la superficie
del cuerpo



Usar
1 MINI DAP
200 ml



+ 9% de la superficie
del cuerpo



Usar
1 DAP
5 litros

10. Características Diphoterine®

Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes

Máximo efecto Extraer el químico del ojo, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.

Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como "Dispositivo medico clase 2 uso externo." No sujeto a control de medicamentos.

No es toxico

Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.

DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl
hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587