

Producto ESTACION COMPLETA DIPHOTERINE-
CAJA POLIURETANO S RUEDA

Código 600133



1. Descripción	ESTACION COMPLETA DIPHOTERINE-CAJA POLIURETANO S RUEDA
2. Marca	Diphoterine® - Prevor
3. Procedencia	Francia.

Características técnicas del producto

Estación móvil de poliuretano completa pensando para contener ducha de descontaminación química de emergencia para piel y ojos Diphoterine®

4. Imagen referencial



5. Contenido	Código interno	Unidad/kit	Material/contenido
	600133	1	Estación completa Diphoterine® sin rueda
	600101	1	1 DAP Diphoterine® 5 litros
	600107	1	Mini DAP 200 mL
	600112	1	After Wash
	600109	2	Botella Lavaojos 500 mL

6. Características específicas DAP 5L Diphoterine®	- Utilización	Todo el cuerpo, ojos y piel, de acuerdo a los diferentes formatos.
	- Dimensiones	725 mm de alto. 380 mm de ancho. 322 mm de profundidad.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	- Contenido	Solución Diphoterine®	
	- Es Estéril	El contenido liquido se encuentra esterilizado	
	- Un solo Uso	Después de su uso debe desecharse	
	- Recargable	Únicamente DAP 5 Litros es recargable	
	- Clasificación según ISP	Dispositivo medico clase 2	
	- Gas propulsor	Gas no inflamable – Clase 2.2 (según NCh 382:2021) UN Mini-DAP: 1950 UN DAP: 1013	
7. Cobertura sobre grupos de químicos	- Cobertura	Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores.	
8. Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Box y/o armario con compartimientos internos, adaptado para mantener el lavado de emergencia Diphoterine®. • 2 lavajos LPMD 500 mL. • 1 lavajos de solución afterwash II. • 1 mini DAP 200 mL. • 1 DAP 5 litros. • Impermeable. • Protege los lavados de emergencia del polvo y la corrosión. • El poliuretano permite aislamiento térmico. • Conforme a las normas EN 15154-4 et DIN EN 15154-4. • Certificación CE. 		
9. Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme normas EN 15154-3: Duchas para el cuerpo portátiles. • Conforme norma EN 15154-4: Lavajos portátiles. 		
10. Hoja de Seguridad según NCh 2245:21 e informe INN	N° de Informe:	<ul style="list-style-type: none"> • DAP 5 litros, 3456-0064-17 • Lavajos LPMD, 3456-0071-17 • Mini DAP, 3456-0073-17 	

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Formatos indicados para proyecciones en la piel de sustancias químicas. En superficie corporal hasta el 9% usar Mini DAP Diphoterine®, sobre el 9% hasta cuerpo completo utilizar DAP Diphoterine®.
- Para salpicaduras oculares utilizar LPM Diphoterine® 500 ml.
- Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.
- En caso de usar presentaciones en spray sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación.

1. Despejar y quitar la ropa



2. Abrir y activar la ducha emergencia



3. Aplicar el formato completo sobre la zona



4. Avisar y consultar medico



- Use cada formato de Diphoterine ® para la zona del cuerpo según el protocolo Prevor.

11. Protocolo de uso





DESCRIPCIÓN TÉCNICA

12. Características Diphoterine®

- Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes.
- Máximo efecto: Extraer el químico del tejido (piel u ojos), evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.
- Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como "Dispositivo medico clase 2 uso externo." No sujeto a control de medicamentos.
- No es tóxico
- Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.

DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl
hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587