



# DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.4 - 2025

**Producto** LIS DIPHOTERINE® 50 ML LAVADO OCULAR

**Código** 600105



1. Descripción	LIS DIPHOTERINE® 50 ML LAVADO OCULAR
2. Marca	Diphoterine ® Prevor
3. Procedencia	Francia

## Características técnicas del producto

Lavaojos de emergencia Diphoterine® es una solución de lavado hipertónica, anfótera y polivalente. Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 10 primeros segundos. Para la descontaminación de salpicaduras oculares.

## 4. Imagen referencial




5. Características específicas	• Dimensiones	12.4 cm x 6.4 cm de diámetro
	• Volumen	50 ML
	• Peso	95 gramos
	• Contenido	Solución Diphoterine®

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesorio Disponible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incluye: Funda de tela rígida con soporte para cinturón.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plazo de intervención</li> </ul>	<p>Máximo 60 segundos</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mecanismo de acción</li> </ul>	<p>Diphoterine® encapsula, inactiva y lava de manera mecánica el químico de la superficie de los tejidos impidiendo que penetre. Gracias a su hipertonicidad logra extraer el químico que ha penetrado.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso</li> </ul>	<p>La solución Diphoterine® es de un solo uso, el contenido debe ser vaciado por completo para asegurar una correcta descontaminación.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clasificación según MINSAL</li> </ul>	<p>Dispositivo medico clase II <i>Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cobertura</li> </ul>	<p>Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes, reductores y alquilantes. <i>*En caso de HF (Ácido Fluorhídrico y sus derivados, utilizar Ducha de emergencia Hexafluorine®)</i></p>
<h2>6. Ventajas</h2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaojos portátil, ligero y compacto.</li> <li>• Lista para su uso, permite una acción rápida y mayor margen de intervención.</li> <li>• Aplicador ocular ergonómico que facilita la apertura del ojo.</li> <li>• Lavado suave sin presión y autónomo.</li> <li>• Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único.</li> <li>• Sin mantenimiento ni instalación particulares; no requiere alimentación, tuberías o válvulas, sin riesgo de fugas.</li> <li>• No es toxico.</li> <li>• Libre de fosfatos.</li> <li>• Solución 100% esterilizada.</li> <li>• Precinto que garantiza la integridad del dispositivo.</li> <li>• Conforme a la norma EN 15154</li> <li>• Certificación CE.</li> </ul>	
<h2>7. Protocolo de uso</h2>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Colocarse fuera del peligro</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Quitarse la ropa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Lavar lo más rápidamente posible respetando el protocolo de la solución Diphoterine®</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Alertar</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Obtener una opinión médica</p> </div> </div>	

## 8. Superficie de intervención

- Formato indicado para salpicaduras oculares en los primeros 10 segundos iniciales desde que ocurre la salpicadura y para una gota de producto químico en el ojo.
- Permite el lavado de un ojo después de una salpicadura química.
- Aplicar sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según protocolo.
- Usar el contenido completo.

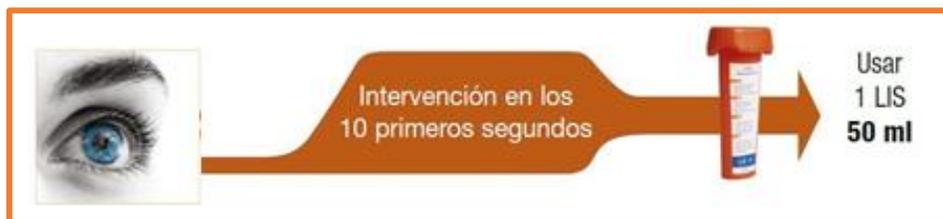

## DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA / [www.sagita.cl](http://www.sagita.cl) / [www.tiendasagita.cl](http://www.tiendasagita.cl)  
[hablemos@sagita.cl](mailto:hablemos@sagita.cl) / 562 22441191 / 569 73765587