



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V. 5 - 2022

Producto KIT EMERG QUIM FULL - GABINETE METALICO ANTICORROSIVO

Código 700010



1. Descripción	KIT EMERG QUIM FULL - GABINETE METALICO ANTICORROSIVO	
2. Marca	Diphoterine ® Prevor	
3. Procedencia	Francia	
Características técnicas del producto		
Gabinete naranja pintura anticorrosiva contenedor de lavado de descontaminación química.		
4. Imagen referencial		
5. Características específicas LPMD 500 ml Diphoterine®	Contenido	Lavado de emergencia química Diphoterine® para ojos y piel: 2 botellas LPM de 500 ml 1 Mini Dap de 200ml
	Dimensiones botiquín	28 X 8 X 30 Cm
	Utilización	Ojos y piel
	Plazo de intervención	En el primer minuto
	Es Estéril	El contenido liquido esterilizado
	Un solo Uso	Después de su uso debe desecharse.
	Clasificación según Minsal	Dispositivo medico clase 2
6. Cobertura sobre grupos de químicos	Cobertura	Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes y reductores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

7. Ventajas

- Portátil, Ligero y compacto.
- Fácilmente identificable y manejable.
- Utilización simple y lista para el uso.
- Permite una acción rápida.
- El aplicador ocular ergonómico facilita la apertura del ojo.
- Lavado suave sin presión y autónomo.
- Solución estéril.
- Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo.
- Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único.
- Impermeable y compacto.
- Sin mantenimiento ni instalación particulares.
- Conforme a la norma EN 15154-4.
- Certificación CE.

8. Protocolo de uso LPMD 500ML Diphoterine®

Formato indicado para proyecciones oculares, una salpicadura, una gota de sustancia química en el ojo.


- Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.



9. Protocolo de uso Mini Dap Diphoterine®

Formato indicado para proyecciones en la piel, una salpicadura, de sustancia química en la piel.

- Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.
- En caso de usar sobre el rostro, cierre los ojos durante su aplicación

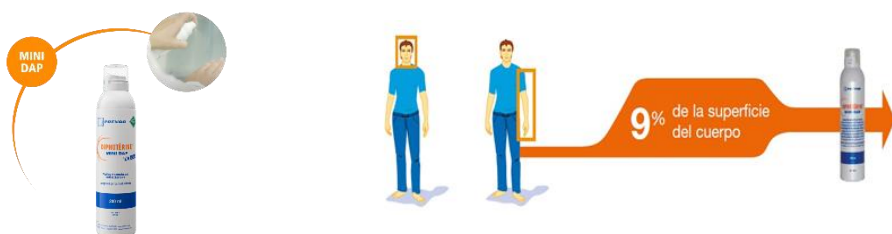



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

10. Características Diphoterine®

Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes.

Máximo efecto Extraer el químico del ojo, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.

Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como "Dispositivo medico clase 2 uso externo." No sujeto a control de medicamentos.

No es tóxico

Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.

DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA / www.sagita.cl / www.tiendasagita.cl
hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587